



Anleitung zum Selbsttest in der Schule (Roche)

1. Anleitung sorgfältig durchlesen, wenn möglich Video auf Moodle starten (Kurs: AvH gegen Corona).
2. Tische wenn nötig reinigen (blaues Reinigungsmittel im Raum vorhanden)
Ab hier: Die Lehrkraft trägt Handschuhe.
3. Lehrkraft teilt Testkassette, Teststäbchen, Pufferlösung und Deckel aus.
Achtung: Die Verpackung der Deckel geht schwer auf.
Darauf achten, dass keine Deckel herausfallen!
4. Testkassette auspacken und Haltbarkeit am kleinen Silikat-Beutel prüfen.
(Gelb→alles gut; Grün→Testkassette defekt)
5. Teststäbchen am unteren Ende (durch Pfeil auf der Packung gekennzeichnet) öffnen. „Wattebausch“ nicht berühren!
6. Den Wattebausch etwa 2 cm in die Nase einführen und in Kreisbewegungen mind. 6-mal gegen die Naseninnenseite streichen. Den Vorgang im anderen Nasenloch mit demselben Tupfer wiederholen.
7. Pufferlösung öffnen. **Teststäbchen dabei nicht ablegen!**
8. „Wattebausch“ des Teststäbchens in die Pufferlösung tauchen und 15 Sekunden hin und her bewegen. Röhrchen dabei mehrmals zusammen drücken.
9. Beim Entnehmen des Teststäbchens durch Zusammendrücken des Röhrchens den Wattebausch „auswringen“.
10. Deckel fest aufsetzen.
11. Pufferlösung senkrecht über das runde Feld der Testkassette halten und **3 Tropfen** hinein träufeln.
12. Wecker auf 15 Minuten stellen bzw. Timer im Video laufen lassen. Die Tests während den 15 Minuten nicht bewegen.
13. Nach dem Ablesen des Tests Tische nochmals reinigen.



vollständiges Test-Kit: Teststäbchen, Testkassette, Pufferlösung und Deckel!

Achtung Rückseite!






Auswertung des Schnelltestes (durch die Lehrkraft):

Das Testergebnis sollte nach 15 Minuten abgelesen werden.

Nach 30 Minuten ist der Test ungültig.

- 1) Positives Testergebnis: Das Vorhandensein einer Testlinie (T) zusammen mit der Kontrolllinie (C) bedeutet ein positives Ergebnis – auch, wenn die Linien schwach ausgeprägt sind. In diesem Fall bitte im Sekretariat oder bei Herrn Nisch per Messenger (NISC) melden.
- 2) Negatives Testergebnis: Das Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) aber keiner Testlinie (T) bedeutet, dass keine SARS-CoV-2-Infektion nachweisbar ist. Mit medizinischer oder FFP-2- Maske darf am Unterricht teilgenommen werden.
- 3) Ungültiges Testergebnis: Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, hat der Test nicht richtig funktioniert.

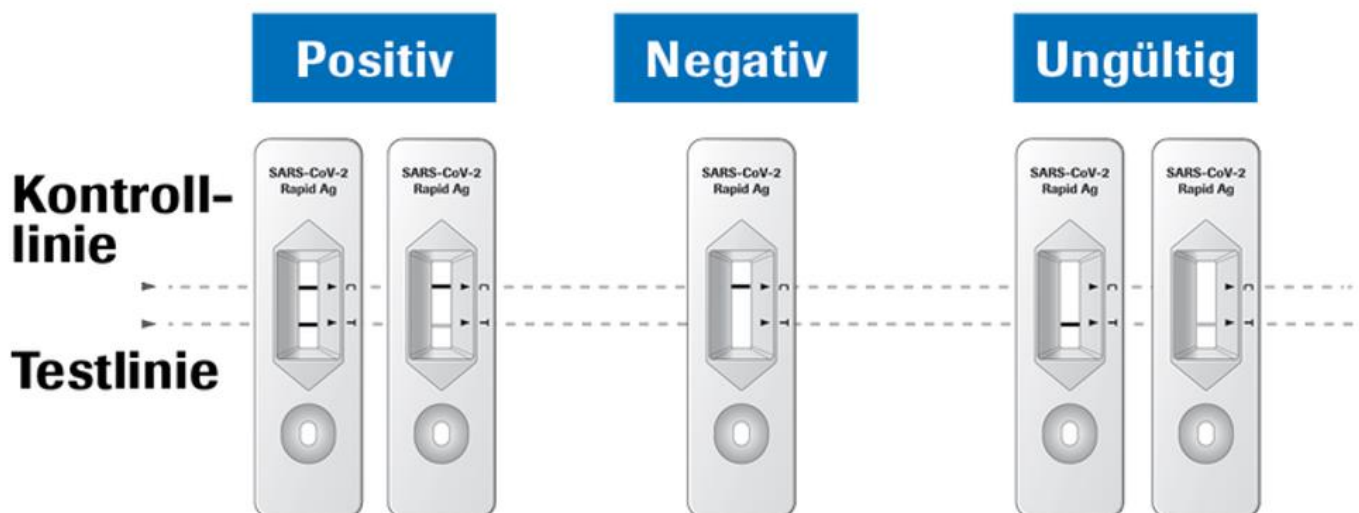

Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an Herrn Nisch oder an das Sekretariat!