





Schnelltest-Anleitung für Tests mit separater Extraktionslösung


1. Anleitung sorgfältig durchlesen.
Stoppuhr / Timer bereithalten.
2. Hände waschen oder desinfizieren.
3. Überprüfung des Test-Kits auf Vollständigkeit
(verpackter Abstrich-Tupfer, Röhrchen und Extraktionslösung, versiegelte Testkassette)
4. Extraktionslösung in Röhrchen füllen und dieses in die entsprechende Halterung der Kartonage stellen.
5. Testkassette auspacken, auf Beschädigung prüfen und auf den Tisch legen.
6. Abstrichtupfer auspacken, auf richtiges Ende achten!
(nicht den „Wattebausch“ berühren, Stäbchen in der Hand behalten)
7. „Wattebausch“ des Tupfers langsam etwa 2 cm in ein Nasenloch einführen und mindestens 15 Sekunden lang (4 bis 6 mal) in Kreisbewegungen gegen die Naseninnenseite streichen. Den Vorgang im anderen Nasenloch mit demselben Tupfer wiederholen.
8. „Wattebausch“ des Tupfers in die Extraktionslösung tauchen und **mindestens EINE Minute lang** hin und her bewegen. Während der Entnahme des Tupfers wird das Fläschchen zusammengedrückt, um den Wattebausch „auszuwringen“.
9. Abdeckkappe auf das Röhrchen drücken.
10. Weißer Schraubdeckel abschrauben, Pufferlösungs-Röhrchen senkrecht über das runde Feld der Testkassette halten und **DREI** Tropfen hinein träufeln.
ACHTUNG: Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung (S) ist zu vermeiden!
11. Stoppuhr / Timer starten und Testergebnis nach 15 Minuten ablesen.

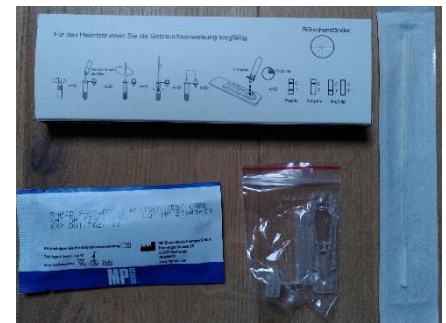

3) vollständiges Test-Kit

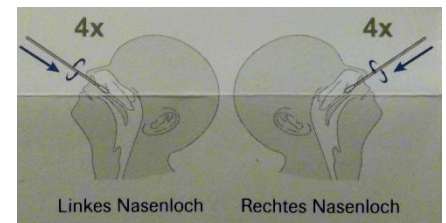

7) Nasenabstrich

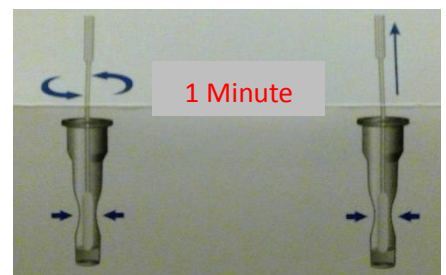

8) Probe in Pufferlösung




10) Testkassette: Bei „S“ zwei Tropfen Probenlösung hineingeben.



Informationen zur Auswertung des Schnelltests

Das Testergebnis sollte nach 15 Minuten abgelesen werden. Nach 20 Minuten ist der Test ungültig.

- 1) Positives Testergebnis: Das Vorhandensein einer Testlinie (T) zusammen mit der Kontrolllinie (C) bedeutet ein positives Ergebnis – auch, wenn die Linien schwach ausgeprägt sind.
- 2) Negatives Testergebnis: Das Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) aber keiner Testlinie (T) bedeutet, dass keine SARS-CoV-2-Infektion nachweisbar ist. Mit medizinischer oder FFP-2-Maske darf am Unterricht teilgenommen werden.
- 3) Ungültiges Testergebnis: Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, hat der Test nicht richtig funktioniert.

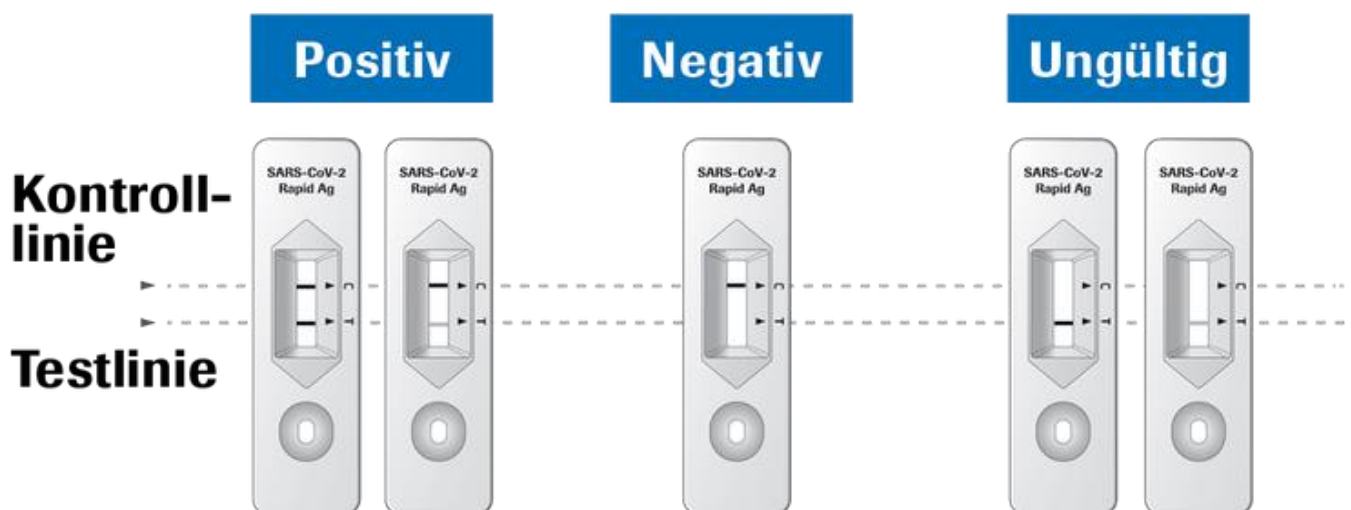

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Nisch oder an das Sekretariat!